

Modo de uso:


Lipoless® *Tirzepatida*

A) Tomar el autoinyector por la parte superior y desenroscar, de modo tal de separar los cuerpos del mismo.

(Ver figura 2)

B) Tomar la parte superior del autoinyector, apoyando el mismo sobre una superficie plana y dura, y empujar hacia abajo el cuerpo del autoinyector para preparar el mecanismo de disparo. Se escuchará un clic como señal de que ello ha sucedido. (Ver figura 3 y 4)

C) Tomar la parte inferior del autoinyector, apoyar sobre una superficie dura y plana. Insertar la jeringa prellenada por la parte superior y presionar. Se puede ayudar con el dedo. Presionar la jeringa hasta que la misma haga tope en el cuerpo inferior del autoinyector. (Ver figura 5 y 6)

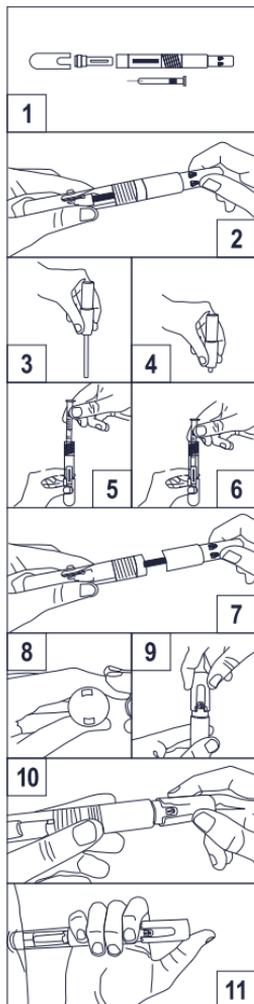

D) Tomar la parte superior del autoinyector, y proceder a enroscar los cuerpos del mismo. (Ver figura 7)

E) Retirar la tapa y colocarla del lado de la llave de seguridad, permitiendo la visualización del símbolo de bloqueo. (Ver figura 8 y 9)

F) Retirar el removedor de capuchón; de ese modo el capuchón de la jeringa se desprenderá solo.

G) Desbloquear el autoinyector para proceder a la aplicación de la inyección, girando la tapa que se encuentra en el extremo superior hasta que se pueda observar el símbolo de desbloqueo. (Ver figura 10)

Precaución: Al realizar este paso el autoinyector se encuentra activado y listo para ser usado, por lo cual puede llegar a perderse la dosis si no se siguen correctamente las instrucciones de uso dadas.

H) Apoyar el autoinyector sobre la zona a inyectar y presionar la tapa de seguridad del mismo hasta escuchar un click, luego esperar 10 segundos hasta que finalice completamente el proceso de inyección.

Importante: No retirar el autoinyector de la zona de aplicación sino hasta que se haya verificado la aplicación completa; para ello el émbolo de la jeringa debe verse a través del visor. (Ver figura 11)

Procedimiento para desarmado y posterior guardado del autoinyector.

• Proceder a bloquear el autoinyector girando la tapa de seguridad hasta que se observe el símbolo de bloqueo.

• Tomar el dispositivo por el medio y desenroscar separando los cuerpos.

• Retirar, sin tocar, la jeringa y su aguja por la parte superior, volcando el producto por la parte de la rosca y desecharla en un descartador de cortopunzantes.

• No tocar la aguja. No tapar la aguja. No extraer la aguja.

• Desechar la aguja junto con la jeringa.

• Enroscar nuevamente la parte superior e inferior.

• Agregar el removedor de capuchón, y colocar la tapa de seguridad.

• Guardar el autoinyector siempre en su estuche hasta la próxima inyección.

• Lavarse las manos nuevamente después del procedimiento.

Información sobre la jeringa precargada.

Es importante verificar la fecha de vencimiento y la dosis de la jeringa precargada para confirmar que contiene la dosis correcta, de acuerdo a lo indicado por el médico tratante.

-Precauciones especiales de conservación: Conservar en la heladera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

-Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

-Eliminación: Se debe desechar la jeringa (junto con la aguja) después de ser utilizada, en un recipiente para objetos cortopunzantes, y de acuerdo con la normativa local.